

# BARRIER® EasyWarm®+

Coperta termoattiva autoriscaldante monouso



La coperta BARRIER® EasyWarm®+ si scalda completamente in 30 minuti e mantiene la temperatura fino a 10 ore.

- Contribuisce a prevenire l'ipotermia nell'intera fase perioperatoria.
- Le parti superiore e inferiore della coperta possono essere staccate e riunite facilmente grazie alla chiusura a strappo. Ciò consente di utilizzare la coperta anche nelle posizioni più difficili.
- Una volta prelevata dalla confezione, la coperta si scalda subito.
- Utilizzabile senza accessori.

## Istruzioni sull'impiego



**1.** Aprire la confezione dall'intaglio nell'angolo in alto a sinistra. Estrarre la coperta BARRIER® EasyWarm® dalla confezione esterna.



**2.** Aprire e svolgere completamente la coperta BARRIER EasyWarm+, facendo attenzione a non posizionarla ripiegata. La coperta si scalda completamente all'aria in 30 minuti e mantiene la temperatura fino a 10 ore.



**3.** Posizionare la coperta BARRIER EasyWarm+ con i pad riscaldanti rivolti verso l'alto. Il lato bianco indica il paziente. Evitare di appoggiare altri pesi sulla coperta.



**4.** Durante e dopo l'intervento e in caso di interventi a mani/braccia e testa, posizionare la coperta BARRIER EasyWarm+ su tutto il corpo del paziente.



**5.** In caso di interventi nell'area addominale inferiore e alle estremità inferiori, separare le due parti della coperta BARRIER EasyWarm+ e posizionare la parte superiore sul torace e sulle estremità superiori.



**6.** In caso di interventi sopra l'area genitale, dividere la coperta BARRIER EasyWarm+ e posizionare la parte inferiore sulla zona dell'anca e sulle gambe.



**7.** In caso di interventi nell'area addominale inferiore separare le due parti della coperta BARRIER EasyWarm+ e posizionare la parte superiore sul torace e sulle estremità superiori, quella inferiore sulla zona dell'anca e sulle gambe.



**8.** Le parti superiore e inferiore della coperta possono essere staccate e riunite facilmente grazie alla chiusura a strappo. (La parte inferiore può essere anche tagliata in due parti alla linea indicata.) Ciò consente di utilizzare la coperta anche nelle posizioni più difficili.

## Istruzioni per l'uso

- Utilizzare esclusivamente sotto controllo medico o infermieristico.
- Posizionare la coperta con i pad riscaldanti rivolti verso l'alto. Il lato bianco indica il paziente. Il lato corretto è indicato dalla scritta «THIS SIDE UP» (LATO VERSO L'ALTO) sulla coperta.
- Non posizionare la coperta ripiegata.
- Evitare di appoggiare altro peso o di esercitare pressione sulla coperta, ad esempio posandovi sopra strumenti medici. Non posare sulla coperta mani, braccia ed estremità del paziente anestetizzato.
- Controllare regolarmente, secondo il protocollo ospedaliero, che non si verifichino eventuali reazioni cutanee.
- Da utilizzare con persone a partire dai 18 anni d'età.

## Avvertenze/Controindicazioni

- Non indicata per pazienti con grave compromissione della circolazione periferica (anche della cute).
- Non utilizzare la coperta in ambiente ricco di ossigeno, cioè la coperta non deve essere utilizzata in medicina iperbarica e i pad riscaldanti non devono venire a contatto con il flusso d'aria di terapie a base di ossigeno o di apparecchi.
- I pad riscaldanti sono magnetici e non trasparenti. Rimuovere la coperta prima di esami radiologici o RMI.
- In caso di sistemi di medicazione transdermici (cerotti) il calore prodotto dalla coperta può aumentare il rilascio del medicamento.

## BARRIER® EasyWarm®+ Coperta termoattiva autoriscaldante

Art. N°.	Prodotto	Materiale	Imballaggio	Cart. sped.
629910	12 pad riscaldanti che si attivano all'aria (13 cm x 10 cm), integrati in tasche sulla superficie. Dimensioni della coperta: 110/150 cm x 200 cm.	Multistrato in SMS (polipropilene). I singoli strati e le tasche sono cuciti insieme con filo di poliestere/cotone. I pad riscaldanti sono costituiti da sacchetti traspiranti che contengono carbone attivo, argilla, sale, acqua e polvere di ferro.	Imballaggio sotto vuoto in sacchetto ermetico in polimero. I sacchetti sono avvolti in fogli di pluriball e posti in un cartone per la spedizione.	7 pezzi

## Posizioni nei diversi interventi chirurgici

La coperta BARRIER® EasyWarm®+ è flessibile e indicata per l'impiego negli interventi chirurgici più diversi. Si riportano di seguito alcuni consigli su come utilizzare la coperta negli interventi più comuni.



Chirurgia addominale



Interventi laparoscopici



Interventi al ginocchio



Interventi alla spalla



Interventi alla spalla



Interventi alla colonna vertebrale



Urologia/Ginecologia



Urologia/Ginecologia



Urologia/Ginecologia



Interventi all'anca



Interventi all'anca



Chirurgia laringoiatrica

---

Per maggiori informazioni consultare il sito [www.molnlycke.com](http://www.molnlycke.com)

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, GERMANIA Telefono +49 211 920 880

Mölnlycke Health Care GmbH, Wagenseilgasse 14, 1120 Vienna, AUSTRIA Telefono +43 1 278 85 42

Mölnlycke Health Care AG, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, SVIZZERA Telefono +41 44 744 54 00

Mölnlycke, BARRIER e EasyWarm e i corrispondenti nomi e loghi sono marchi registrati a livello internazionale di una o più aziende del gruppo imprenditoriale Mölnlycke Health Care. ©2021 Mölnlycke Health Care AB. Tutti i diritti riservati. DEIM003050

