

## BARRIER® Trousse de crâne

- 100% impérmeable avec une zone renforcée
- Plié de façon optimale pour une utilisation stérile
- Solution tout-en-un pour une utilisation rapide et aisée. Peut être apposé en toute simplicité par une seule personne
- Poche de recueil intégrée, avec évacuation
- Les liquides s'écoulent par les flancs vers la poche de recueil
- Zone d'incision intégrée






1 Formez un carré avec les champs adhésifs. Posez le champ supérieur, puis la partie inférieure...



2 ... et enfin les champs formant les côtés du carré.



3 Tournez le champ équipé de la poche de recueil dans la bonne position (voir pictogramme).

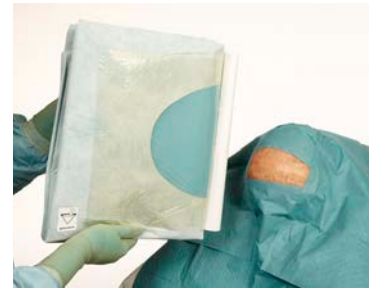

4 Retirez le papier protecteur.



5 Veillez à ce que le drapage soit centré sur le champ opératoire.



6 Dépliez d'abord les flancs...



7 ... avant d'ouvrir le champ vers le bas.



8 Tirez ensuite le champ vers les pieds du patient.

	Code stérile
888142	Trousse de crâne
888242	Trousse de crâne