



BARRIER® Champ d'arthroscopie genou

- Poche de recueil intégrée, pour une gestion efficace des fluides
- Matériaux imperméables pour une sécurité optimale du patient
- Pliage optimal, pour une application aseptique et une mise en place aisée par une seule personne
- Convient également pour une table inclinée

Instructions d'utilisation



1. Commencez par déplier le champ de table et posez-le sous la jambe du patient.



2. Glissez la jambe dans la stockinette. Repliez la couche confort absorbante de la stockinette vers l'intérieur pour éviter tout risque de contaminations microbiennes.



3. Fixez-la avec les bandes adhésives.



4. Notez la direction du pictogramme. Posez le champ d'arthroscopie déplié sur le pied du patient. Passez la main dans l'ouverture élastiquée, agrippez le pied du patient et faites-le passer dans l'ouverture.



5. Dépliez la partie inférieure du champ sous la jambe du patient et positionnez les deux ouvertures élastiquées autour de son genou.



6. Dépliez la partie supérieure du champ vers la tête du patient. Utilisez les patches adhésifs pour fixer la poche.



7. Placez la jambe dans la position voulue pour l'intervention. Il convient également à une utilisation sur une table inclinée.

Scannez le code QR pour plus d'informations sur Mölnlycke ou pour visionner des vidéos d'instructions.



N° de réf.	Description	Disp/Trp
60101	Trousse d'arthroscopie genou 1 champ d'arthroscopie genou 230x320cm, ouv. 7 et 5cm élastiques 1 champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant	5/10
60102	Trousse d'arthroscopie genou 1 housse de mayo 79x145cm, 65x85cm absorbant 4 serviettes absorbantes 18x25cm 1 champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant 1 stockinette 22x75cm 2 bandes adhésives 9x49cm 1 champ d'arthroscopie genou 230x320cm, ouv. 7 et 5cm élastiques 1 champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant	4/8
60104	Champ d'arthroscopie genou 230x320cm, ouv. 7 et 5cm élastiques	5/10
60105	Champ d'arthroscopie genou 260/300x320cm, ouv. 7 et 5cm élastiques, emballé	5/10

Tous ces composants des trousse peuvent également être inclus dans les trousse Mölnlycke®.

N° de réf.	Composants de trousse
70104	Champ d'arthroscopie genou 230x320cm, ouv. 7 et 5cm élastiques
70105	Champ d'arthroscopie genou 260/300x320cm, ouv. 7 et 5cm élastiques

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72, boîte 2, BE-2600 Berchem, Belgique
Tél. 03 286 89 50, Fax 03 286 89 52.

Le nom et le logo de Mölnlycke® et BARRIER® sont des marques déposées du groupe Mölnlycke Health Care.
© 2017 Mölnlycke Health Care. Tous droits réservés. (BFSU00881702)

Mölnlycke®