


Mepilex® Border Lite

Pansement hydrocellulaire siliconé auto-adhésif mince

- minimise les traumatismes et la douleur™
- pour les plaies sèches à exsudatives
- bord auto-adhésif à base de silicone douce



Mode d'emploi

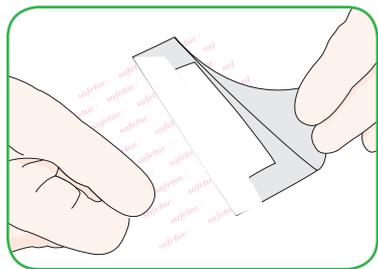

Nettoyez la plaie. Séchez bien le pourtour. Veillez à ce que la peau soit propre et exempte de pommade ou de crème hydratante. Otez le film protecteur supérieur. Le coussin en mousse doit recouvrir la plaie.



Positionnez d'abord le côté que vous avez débarrassé de son film protecteur et maintenez la 2e partie soulevée. Appliquez la face adhésive sur la plaie. Avant d'appliquer la 2e partie, enlevez le 2e film protecteur (à l'aide de la languette). Attention ! Ne pas découper Mepilex® Border Lite à hauteur du coussin en mousse !



Avantages de Mepilex® Border Lite


- Minimise les traumatismes et la douleur™ lors du changement de pansement
- Minimise le risque de macération
- Peut être maintenu plusieurs jours sur la plaie
- Accroît le confort du patient
- Présente un pouvoir adhésif élevé et une haute tolérance cutanée
- Résiste à la douche
- Adhère parfaitement aux zones difficiles d'accès telles que les pavillons auriculaires
- Respecte la peau sensible des enfants lors du retrait

Applications

- plaies sèches à exsudatives
- escarres
- plaies traumatiques telles que les abrasions, les coupures
- chirurgie de la main
- lésions postopératoires
- protection des peaux sensibles et/ou abîmées des nourrissons, des enfants et des personnes âgées

Mesures de précaution

En cas de signes cliniques d'infection, instaurer un traitement adéquat.

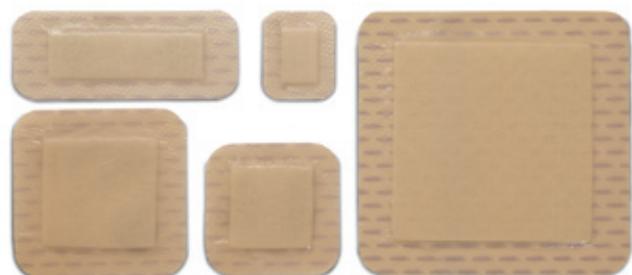

Gamme Mepilex® Border Lite (stérile)

Dimensions	code CNK	N° d'art.	Conditionnement	Emb. de transp.
4 x 5cm	2256-592	281000	10 x 1 pièce	70 pièces
5 x 12,5cm	2256-626	281100	5 x 1 pièce	65 pièces
7,5 x 7,5cm	2256-634	281200	5 x 1 pièce	70 pièces
10 x 10cm	2256-667	281300	5 x 1 pièce	50 pièces
15 x 15cm	2256-683	281500	5 x 1 pièce	50 pièces